

Pflegehinweise

APNOEX

Protrusionsschienen mit hohem Komfort.



Liebe/r Patient/in,

Ihre ApnoeX® Schiene besitzt eine sehr glatte und gleichmäßige Oberfläche, weswegen Sie deutlich resistenter gegen Geruchsbildung, Abnutzung und Beläge ist als vergleichbare weichbleibende Schienen.

Dennoch ist eine regelmäßige Reinigung für eine langanhaltende und hygienische Anwendung empfehlenswert.

Zur Reinigung der Schienen empfehlen wir einfaches Spülmittel, die mit einer Zahnbürste aufgetragen wird. Der Einsatz von Zahnpasta ist aufgrund der reibenden Bestandteile nicht zu empfehlen, da sie die Oberflächen zerkratzen und sich in Folge mehr Ablagerungen anheften. Auch eine leichte Lösung aus alkoholfreier Mundspülung und Wasser kann zum Reinigen verwendet werden.

Der Einsatz von Reinigungstabletten ist ebenfalls zu empfehlen, da vor allem Keime und Bakterien nicht vollständig mit der Zahnbürste entfernt werden können. Diese sollten allerdings nur ein bis zweimal im Monat und keinesfalls täglich angewendet werden, um das Material der Schiene nicht dauerhaft zu schwächen.

Eine professionelle Reinigung im Dentallabor ist empfehlenswert und verlängert die Lebensdauer der Schiene deutlich, da eine Sterilisation, Kontrolle und Überarbeitung aller Oberflächen durchgeführt wird. Auch harte Beläge wie bspw. Zahnstein werden rückstandslos entfernt

Die Besonderheiten auf einen Blick

Sehr gleichmäßige und **glatte Oberfläche**

Hohe Resistenz gegen Geruchsbildung, Abnutzung und Beläge

Einfache Reinigung mit einer Zahnbürste und Spülmittel/Kernseife

Allergiker freundlich, metallfrei, unter 1% Restmonomergehalt (MMA)

Bonuskarte mit Reinigung und Kontrolle für langanhaltende hygienische Anwendung

Reparaturfähig

Kostengünstige **Zweitschiene** auf Wunsch möglich